

**MATRY'S - Soluzione di peptidi a basso peso molecolare (PBP) derivati da collagene idrolizzato**



**SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO**

Rev 04  
14/10/2022

**DESTINAZIONE D'USO**

Soluzione di peptidi a basso peso molecolare (PBP) derivati da collagene idrolizzato in siringa preriempita, per uso infiltrativo e iniettivo intra-articolare, peri-articolare, intra-muscolare, intra-dermico e epiteliale.



**CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVO MEDICO**

Allegato IX DLgs 46/97 esm	Classe III, Regola 8.3 e Regola 17
CND	P900402
RDM	Vedi tabella "FORMATI E CODIFICHE"
GMDN	33525

**DATI DEL FABBRICANTE**

NOME E RAGIONE SOCIALE	Tiss'You S.r.l.
INDIRIZZO	Strada di Paderna, 2 - 47895 Domagnano (RSM)
TELEFONO	+39 0549 964537
FAX	+39 0549 964354
EMAIL	info@tissy.com
SITO INTERNET	www.tissy.com

**PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE**

Siringhe pre-riempite pronte all'uso.
Peptidi a basso peso molecolare (PBP) derivati da collagene idrolizzato di origine bovina.
Vitamina C (acido ascorbico stabilizzato).
Rafforzamento diretto della matrice extracellulare dei tessuti connettivi.
Favorisce il recupero della struttura naturale e della funzionalità dei tessuti connettivi ed epiteliali.
Migliora la mobilità articolare e allevia i sintomi del dolore delle articolazioni e delle strutture connettivali circostanti (muscoli, tendini, legamenti, menischi) causati da invecchiamento, degenerazione, traumi, sovraccarico e difetti posturali.

**STERILIZZAZIONE**

Dispositivo sterilizzato mediante irradiazione a raggi Gamma a 25 kGy.

Tiss'You S.r.l.		1
Sede Legale e produttiva: Strada di Paderna, 2 - 47895 Domagnano (RSM)		
Tel.: +39 0535 38397, Fax: +39 0549 964354		
e-mail info@tissy.com - www.tissy.com		

**MATRYYS - Soluzione di peptidi a basso peso molecolare (PBP) derivati da collagene idrolizzato**



**SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO**

**Rev 04  
14/10/2022**

**SHELF LIFE**

Soluzione di peptidi a basso peso molecolare della linea MATRYYS hanno una Shelf Life di 5 anni dalla data di sterilizzazione. La Shelf Life è garantita solamente se i dispositivi sono in confezione originale ed integra e conservata secondo le indicazioni fornite da Tiss'You S.r.l.

**TEMPI DI RIASSORBIMENTO**

Poiché MATRYYS è un dispositivo iniettabile riassorbibile, la sua degradazione e il suo riassorbimento, in assenza di fattori esterni che contribuiscano ad accelerarlo o a ritardarlo, dipende dal tempo necessario per essere assorbito a livello delle cellule del tessuto connettivo (ad esempio, fibroblasti, condrociti, ecc.) ed essere metabolizzato di conseguenza.

**CONFEZIONAMENTO**

<b>Primario</b>	Siringa pre-riempita in Busta in alluminio/accoppiato (ALU/OPA-PE)
<b>Secondario</b>	Busta in alluminio/accoppiato (ALU/OPA-PE)
<b>Imballaggio esterno</b>	Scatola di cartone

**PRINCIPALI COMPONENTI**

<b>Peptidi di collagene</b>	Peptidi di collagene da pelle bovina altamente purificati e in polvere. Densità media 300g/L.
<b>Soluzione salina</b>	Soluzione salina tampone fosfato (PBS)
<b>Vitamina C</b>	Acido ascorbico stabilizzato

**INDICAZIONI PER LO STOCCAGGIO**

I dispositivi devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra 15° e 25°C (temperatura ambiente), evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Se conservati correttamente e in un imballaggio intatto, la sterilità dei dispositivi è garantita per 5 anni dalla data di fabbricazione (vedi data di scadenza sull'etichetta esterna).

**INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO**

<b>Prodotto non utilizzato</b>	Smaltire come rifiuto ospedaliero non pericoloso secondo le vigenti leggi.
<b>Prodotto utilizzato</b>	Smaltire come rifiuto ospedaliero pericoloso secondo le vigenti leggi.

**FORMATI E CODIFICHE**

Codice (REF)	Formulazione	N - (Concentrazione in mg/ml)	C(C) - (Volume in ml)	RDM
MTY-110	MATRYYS Regain	1 mg/ml	10 ml	2319917/R
MTY-205	MATRYYS 2	2 mg/ml	0,5 ml	2319918/R
MTY-21	MATRYYS 2	2 mg/ml	1 ml	2319919/R
MTY-22	MATRYYS 2	2 mg/ml	2 ml	2319920/R

**Tiss'You S.r.l.**

**Sede Legale e produttiva: Strada di Paderna, 2 - 47895 Domagnano (RSM)**

**Tel.: +39 0535 38397, Fax: +39 0549 964354**

**e-mail [info@tissyou.com](mailto:info@tissyou.com) - [www.tissyou.com](http://www.tissyou.com)**



<p><b>MATRYS - Soluzione di peptidi a basso peso molecolare (PBP) derivati da collagene idrolizzato</b></p>	<p><b>CE</b> 1434</p>
<p><b>SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO</b></p>	<p>Rev 04 14/10/2022</p>

<p>MTY-505</p>	<p>MATRYS 5</p>	<p>5 mg/ml</p>	<p>0,5 ml</p>	<p>2319921/R</p>
<p>MTY-51</p>	<p>MATRYS 5</p>	<p>5 mg/ml</p>	<p>1 ml</p>	<p>2320292</p>
<p>MTY-52</p>	<p>MATRYS 5</p>	<p>5 mg/ml</p>	<p>2 ml</p>	<p>2320293</p>

	<p><b>Tiss'You S.r.l.</b>  <b>Sede Legale e produttiva: Strada di Paderna, 2 - 47895 Domagnano (RSM)</b>                  Tel.: +39 0535 38397, Fax: +39 0549 964354                  e-mail <a href="mailto:info@tissy.com">info@tissy.com</a> - <a href="http://www.tissy.com">www.tissy.com</a></p>	<p>3</p>
--	--	----------