



● CLOVER

— MISANO —





- Set completo di taglie per procedure open, mis e deformity

- Vite autofilettante per inserimento anche senza maschiatore

- Grandi proprietà meccaniche

- Doppio filetto per migliorare la tenuta

- Strumentario sofisticato ma compatto

- Vite cannulata per iniezione di cemento o sostituto osseo

- Confezione sterile

Sistema di stabilizzazione vertebrale toraco-lombare

Misano è il primo sistema di stabilizzazione toraco-lombo-sacrale, totalmente in titanio, che permette l'utilizzo di un'unica vite peduncolare per il trattamento di tutte le patologie degenerative, traumatiche e deformità. La vite autofilettante può essere inserita senza l'ausilio del maschiatore, ha una filettatura specifica a due principi a livello distale che garantisce un rapido impianto, che poi passa a quattro principi garantendo anche un'elevata tenuta peduncolare. Le viti sono inoltre sempre cannulate per consentirne l'inserimento con l'ausilio di un filo guida e fenestrate per consentirne la cementazione.

Il sistema di stabilizzazione toraco-lombo-sacrale Misano di Clover Orthopedics è costituito da viti peduncolari mono e poliassiali, dadi di serraggio, barre rette e precurve in titanio e in cromo-cobalto, una vasta gamma di uncini, offset, connettori e cross-links e viene utilizzato per favorire una solida artrosi della parte di colonna vertebrale trattata. Opportunamente utilizzato, il sistema di stabilizzazione toraco-lombo-sacrale Misano di Clover Orthopedics è indicato per favorire lo sviluppo di una solida artrosi toracica, lombare e sacrale. Esso è raccomandato nei casi di deformità del rachide, patologia degenerativa del disco, fratture vertebrali traumatiche, tumori vertebrali, stenosi spinali, spondilolistesi, pseudoartrosi e precedenti tentativi di artrosi vertebrale che non abbiano avuto successo. Eventuali decisioni chirurgiche diverse da quelle raccomandate dal fabbricante sono a discrezione e sotto la responsabilità del chirurgo. Non impiegare viti di diametro 4,5 mm nel tratto lombare e lombo-sacrale della colonna vertebrale e non accoppiare viti di diametro 4,5 mm con barre in CoCr.





Caratteristiche



LEGA DI TITANIO



LEGA CO-CR
su richiesta



ETO STERILE

Strumentario

Clover ha investito molto nel design e nella cura degli strumenti con l'obiettivo di creare uno strumentario ergonomico, funzionale e compatto. Progettato per il chirurgo e la sua equipe.



#LESSISMORE

VITE MONOASSIALE CANNULATA - FENESTRATA	D5.5 D6.5 D7.5 D8.5	FROM L30 TO L55 FROM L30 TO L55 FROM L30 TO L55 FROM L30 TO L55
VITE POLIASSALE CANNULATA - FENESTRATA	D4.5 D5.5 D6.5 D7.5 D8.5	FROM L25 TO L40 FROM L30 TO L55 FROM L30 TO L55 FROM L30 TO L55 FROM L30 TO L55
BARRE PRECURVATE IN TITANIO	D5.5	FROM L25 TO L100
BARRE IN TITANIO	D5.5	FROM L110 TO L500
BARRE IN CO-CR	D5.5	FROM L110 TO L500
CAP DI SERRAGGIO PER VITI E UNCINI		
DOMINO		
ELEMENTO DI CONNESSIONE		
CROSSLINK MODULARE		S - M - L - XL
ANGLED OFFSET		FROM L20 TO L60
OFFSET		FROM L20 TO L60
LUMBAR WIDE HOOK		FROM SIZE 7 TO SIZE 11
PEDICLE HOOK		FROM SIZE 5 TO SIZE 9
TORACHIC LAMINAR HOOK		FROM SIZE 5 TO SIZE 9
OLBIQUE HOOK - DX/SX		
OFFSET HOOK - DX/SX		
LUMBAR NARROW HOOK		FROM SIZE 7 TO SIZE 11

misano 

monza 

evo 

dixi 

recon-i 

rally 



Clover Orthopedics s.r.l.

Via Gadames n. 57/7, c.a.p. 20151 Milano

M. info@cloverorthopedics.com

W. cloverorthopedics.com

T. +39 02 457 902 31

F. +39 02 457 902 66

